



## WANTAI SARS-CoV-2

### Ag Бърз тест (колоидно злато)

(тампони за секрет от предната назална част и проби от слюнка)  
Предназначен за самотестване от непрофесионалист


### Ръководство за работа

#### Подготовка

- Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да направите теста.
- Извадете всички компоненти и ги поставете на маса.

Тестови компоненти:

- 1 - Тест касета
  - 2 - Флакон за екстракция (0,5mL)
  - 3 - Стерилен тампон за еднократна употреба
  - 4 - Найлонова запечатващ се плик
- Инструкции за употреба и ръководство за работа

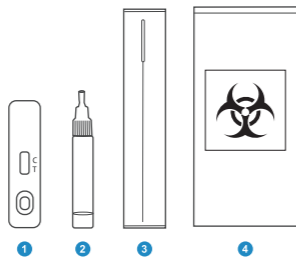


Можете да сканирате QR кода и да видите работното видео.



#### Стъпка 1. Събиране на проби

- Отворете торбичката на тампона.
- Можете да изберете от два вида проби за вземане:

**Проби от тампон за секрет от предната назална част:** Вкарайте целия абсорбиращ връх на тампона в ноздрата си и бавно завъртете в кръг по вътрешната част на двете ноздри. Завъртете 4 пъти за общо 15 секунди.

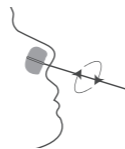

Или,

**Проби от слюнка:** Вкарайте целия абсорбиращ връх на тампона в устата си и бавно забършете устата, горната част на небцето и вътрешната част на лявата и дясната буза (трябва да съберете всичката слюнка, която може да е върху тампона).



#### Стъпка 2. Извличане на проби

- Развийте капачката на флакона за екстракция.
- Поставете събрания секрет във флакона за екстракция с буфера, завъртете енергично секретата, за да се смеси добре с буфера.




- Стиснете тампона към вътрешността на флакона, за да освободите течността от него.



#### Стъпка 3. Извадете тампона

- Скъсайте края на тампона в линията за откъсване и оставете главата на тампона във флакона.

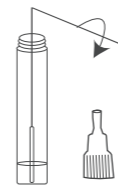


- Внимателно завийте капачката на флакона. Счупете капачката на флакона за екстракция.



#### Стъпка 4. Тестване

- Отворете торбичката на касетата и поставете касетата върху равна повърхност.

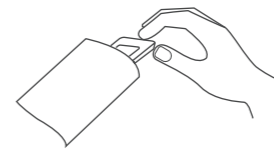


- Стиснете флакона, за да капнете три (3) капки от пробата от флакона за екстракция в ямката за проба на тестовата касета. Изчакайте 15 минути.



#### Стъпка 5. Прочетете резултатите

- Прочетете резултатите от теста след 15 минути, но не след повече от 30 минути

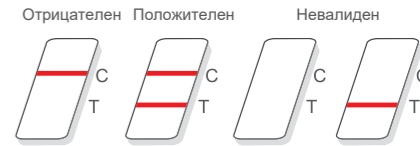

#### Изхвърляне

- Сложете всички компоненти в предоставения найлонов запечатващ се плик. Запечатайте плика и го изхвърлете.

